

## Choix de l'ordinateur pour un Biostim

### Toutes versions

#### Ordinateurs compatibles

Le Biostim est compatible avec :

- Les PC Windows 8, 10 ou 11, fixes ou portables
- Les Mac, fixes ou portables

Le Biostim **ne fonctionne pas** avec :

- Les tablettes ou smartphone quel que soit le système (Android, iOS)
- Les Chromebook

Cas Particulier : Windows 10S n'est pas compatible, mais Microsoft autorise gratuitement d'activer une version 10S pour la transformer en version 10 « classique », donc compatible.

#### Configuration minimale

Les informations suivantes s'appliquent pour un appareil neuf. Il n'est pas conseillé d'acheter des appareils reconditionnés.

Mémoire : 4Go

Processeur :

- Intel i3 pour les versions Windows
- Intel i5 ou puce M1 pour les versions MAC

Ecran : l'appareil fonctionne sur tout type d'écran, mais :

- L'utilisation est déconseillée sur les écrans de 14 pouces ou moins
- La résolution minimale est 1366\*768 (HD), il est conseillé d'utiliser au minimum 1600\*900 (HD+)

La connexion avec l'appareil utilise un port USB. Vérifier qu'il y a suffisamment de port si vous souhaitez brancher une souris ou un clavier externe.

#### Accessoires BlueTooth (Blueback / BioMoov / Emy / Perifit)

Les accessoires Bluetooth ne fonctionnent qu'avec les PC Windows 10 ou 11 (pas avec les Mac).

L'ordinateur doit également disposer d'une puce Bluetooth Low Energy. Si ça n'est pas le cas, il est possible d'en acheter une à brancher sur l'USB.

#### Divers

Eviter d'acheter des alimentations de remplacement qui ne viennent pas du fabricant de l'ordinateur. Les versions « compatibles » génèrent souvent des perturbations qui dégradent le signal biofeedback.