

## Choix de l'ordinateur pour un Biostim

### Toutes versions

#### Ordinateurs compatibles

Le Biostim est compatible avec :

- Les PC Windows 7, 8, 10 ou 11 fixes ou portables
- Les Mac, fixes ou portables

Le Biostim **ne fonctionne pas** avec :

- Les tablettes ou smartphone quel que soit le système (Android, iOS)
- Sur les modes S de Windows (Windows 10S – Windows 11S)
- Les Chromebook

Cas Particulier : Windows 10S et 11S ne pas compatibles, mais Microsoft autorise gratuitement d'activer une version 10S ou 11S pour les transformer en version 10 ou 11 « classique », donc compatible.

#### Configurations minimales

Mémoire : **4Go**

Processeur :

- Intel **i3** pour les versions **Windows**
- Intel **i5** ou puce **M1** pour les versions **MAC**

Écran : l'appareil fonctionne sur tout type d'écran, mais :

- L'utilisation est déconseillée sur les écrans de 14 pouces ou moins
- La résolution minimale est 1366\*768 (HD), il est conseillé d'utiliser au minimum 1600\*900 (HD+)

La connexion avec l'appareil utilise un port USB. Vérifier qu'il y a suffisamment de port si vous souhaitez brancher une souris ou un clavier externe.

### Sondes BlueTooth (Emy / Perifit)

Les sondes Bluetooth ne fonctionnent qu'avec les PC Windows 10 (pas avec les Mac).

L'ordinateur doit également disposer d'une puce Bluetooth Low Energy. Si ça n'est pas le cas, il est possible d'en acheter une à brancher sur l'USB.

### Divers

Éviter d'acheter des alimentations de remplacement qui ne viennent pas du fabricant de l'ordinateur. Les versions « compatibles » génèrent souvent des perturbations qui dégradent le signal biofeedback.